

Anwendungshinweis

Die VACUETTE® Urinentnahmeeinheit ermöglicht einen hygienisch sauberen Transfer der Urinprobe aus einem Gefäß mittels einer Urintransfereinheit direkt in das VACUETTE® Urinröhrchen zum Versand.

VACUETTE® Urintransfereinheit



VACUETTE® Urinröhrchen



SCHRITT 1 Durch vorsichtiges Schwenken den Urin im Gefäß bitte zuerst durchmischen.



SCHRITT 2 Tauchen Sie das Ende der Urintransfereinheit in die Urinprobe ein.



SCHRITT 3: Das mit Patientendaten (Name, Vorname, Geburtsdatum oder entsprechendem Barcode) versehene VACUETTE® Urinröhrchen in die Urintransfereinheit mit der Kappe nach unten zeigend einsetzen.
Achten Sie bitte darauf, dass dabei die Nadel der Transfer-einheit die Sicherheitskappe des Röhrchens vollständig durchdrungen hat und ständig im Urin eingetaucht ist.



Der Urin fließt auf Grund des exakt definierten Vakuums automatisch in das Röhrchen.



Bei Bedarf können, mit einer Transfereinheit, von einem Patientenurin mehrere Röhrchen befüllt werden, d.h. 1 Patient $\hat{=}$ 1 Transfereinheit + ggf. mehrere Röhrchen.

!! WICHTIG !!

Reihenfolge von Schritt 2 und 3 zwingend einhalten, ansonsten zieht die Transfereinheit Luft und das Röhrchen kann nicht mehr verwendet werden.